

Clearblue **+PLUS** TEST DE GROSSESSE

Français

Clearblue est fiable à plus de 99% dès le premier jour de retard des règles.
Lire attentivement la notice avant de faire le test.

1 Faire le test

Vous pouvez effectuer le test dès le 1er jour de retard de vos règles et à tout moment de la journée.

- Lorsque vous êtes prête à faire le test, ouvrez la pochette de protection et retirez le bâtonnet-test. Utilisez-le immédiatement après.
- Retirez le capuchon bleu du test.



Testez votre urine

Vous pouvez effectuer le test directement sous votre jet d'urine, ou en recueillant votre urine dans un récipient propre et sec:


- Maintenez la Tige Contrôle (Tige Absorbante) orientée vers le bas sous votre jet d'urine, ou dans votre échantillon d'urine recueillie, comme indiqué, pendant **5 secondes exactement**.
- La Tige Contrôle deviendra rapidement rose pour indiquer que l'urine a été absorbée. Vous devez cependant maintenir la Tige Contrôle dans l'urine pendant exactement **5 seconds** malgré la coloration en rose de la tige contrôle.
- Gardez la Tige Contrôle orientée vers le bas ou posez le test à plat jusqu'à ce que la ligne bleue apparaisse dans la Fenêtre Témoin.
- Vous pouvez replacer le capuchon si vous le souhaitez.



Reportez-vous à la **question 6** au verso si La Tige Contrôle n'est pas devenue rose dans son intégralité.


2 Attendre l'apparition de la ligne bleue dans la Fenêtre Témoin

- Une ligne bleue dans la Fenêtre Témoin vous indique que le test a bien fonctionné et que vous pouvez lire le résultat.
- Elle doit apparaître au bout d'**1 minute** environ.
- **Ne lisez pas votre résultat avant que cette ligne apparaisse.**
- Si aucune ligne bleue n'est apparue au bout de **10 minutes** dans la Fenêtre Témoin, le test n'a pas bien fonctionné (reportez-vous à la **question 7** au verso).

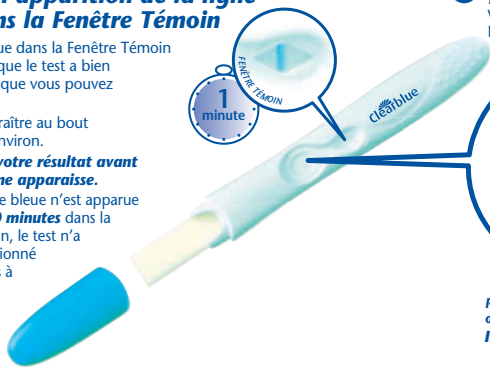

3 Lire le résultat

Vous pouvez maintenant lire votre résultat dans la Fenêtre de Résultat.

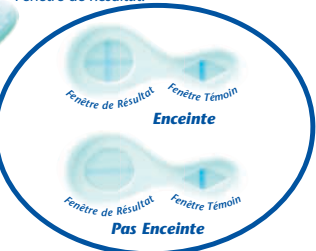

Peu importe si l'une des lignes du signe '+' est plus pâle ou plus foncée que l'autre, le résultat est 'Eceinte':



Si vous n'êtes toujours pas sûre du résultat, reportez-vous à la **question 8** au verso pour plus d'explications.

IMPORTANT! Vous devez lire le résultat au plus tard **10 minutes** après avoir fait le test. Ne prenez pas en compte d'éventuels changements passé ce délai.

1 Quelle est la fiabilité de Clearblue?

Des tests en laboratoire ont montré que Clearblue est fiable à plus de 99% à partir de 50 mIU/ml.

2 Comment fonctionne Clearblue?

Lorsque vous êtes enceinte, votre corps sécrète l'hormone de grossesse hCG (hormone Gonadotrophine Chorionique humaine). La concentration d'hCG augmente très rapidement en tout début de grossesse. Clearblue détecte des quantités infimes de cette hormone dans vos urines dès le 1er jour de retard des règles.

3 Quand effectuer le test Clearblue?

Vous pouvez utiliser Clearblue à tout moment de la journée, à partir du 1er jour de retard des règles. Pour déterminer précisément cette date, calculez la longueur habituelle de votre cycle, c'est-à-dire le nombre de jours entre le 1er jour de vos règles et la veille des règles suivantes.

- Si vos cycles sont irréguliers, considérez votre cycle le plus long au cours des derniers mois pour faire le test.
- Si vous n'avez aucune idée de la date de début de vos règles, vous pouvez effectuer le test au moins 19 jours après la date du rapport non protégé.
- Si le résultat indique 'Pas Enceinte' et si vous soupçonnez malgré tout une grossesse, vous avez peut-être fait le test trop tôt. Attendez au moins 3 jours avant de refaire un test. **Reportez-vous à la question 11.**

4 Dois-je faire mon test avec les premières urines du matin?

Non. Clearblue est si sensible qu'il peut détecter la présence d'hormone hCG dans vos urines à n'importe quel moment de la journée. Cela signifie que vous pouvez faire le test dès que vous avez envie d'aller aux toilettes. Évitez cependant de boire trop de liquide avant de faire le test.

5 Certains médicaments ou certaines conditions médicales peuvent-ils affecter le résultat ?

- Lisez toujours la notice des médicaments que vous prenez **avant** de faire le test.
- Les traitements de fertilité contenant l'hCG peuvent fausser le résultat (ces traitements sont habituellement administrés par injection et un test trop précoce à la suite de l'injection peut donner un faux résultat 'Enceinte').
- D'autres traitements de fertilité (comme le Citrate de Clomifène), les antalgiques et les contraceptifs hormonaux (ex: la pilule contraceptive) n'interfèrent pas avec le résultat.
- Si vous avez récemment arrêté de prendre un contraceptif hormonal ou si vous êtes sous traitement de fertilité comme le Citrate de Clomifène, votre cycle peut être irrégulier, ce qui peut vous amener à faire le test trop tôt.
- Si vous avez été enceinte très récemment (même si la grossesse n'est pas arrivée à terme), il se peut que vous obteniez un faux résultat 'Enceinte'.
- Une grossesse extra-utérine, un kyste ovarien, la ménopause ou de très rares conditions médicales peuvent fausser le résultat. Si vous obtenez des résultats inattendus, il est conseillé d'en parler à votre médecin.

6 J'ai utilisé le test de grossesse mais la Tige Contrôle n'est pas devenue intégralement rose. Que dois-je faire ?

Si la Tige Contrôle n'est pas devenue rose dans son intégralité, c'est que vous ne l'avez peut-être pas suffisamment imbibée d'urine. Si une ligne bleue apparaît malgré tout dans la Fenêtre Témoins au

plus tard 10 minutes après la réalisation du test, alors le test a correctement fonctionné. Si aucune ligne bleue n'est apparue dans la Fenêtre Témoins au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, **reportez-vous à la question 7.**

7 J'ai utilisé le test de grossesse mais aucune ligne bleue n'est apparue dans la fenêtre témoin, que dois-je faire ?

Si aucune ligne bleue n'apparaît dans la Fenêtre Témoins au bout de 10 minutes, alors le test n'a pas fonctionné. Cela peut s'être produit parce que :

- la Tige Contrôle n'a pas été maintenue orientée vers le bas ou le bâtonnet-test n'a pas été posé à plat après l'absorption d'urine
- la Tige Contrôle a été imbibée de trop ou trop peu d'urine (vous devez imbibé la Tige Contrôle pendant **5 secondes**).

Nous vous conseillons dans ce cas de refaire un test en prenant soin de suivre les instructions au recto. Si vous le souhaitez, vous pouvez recueillir un échantillon de vos urines dans un récipient propre et sec et immerger la Tige Contrôle du test dans l'urine pendant seulement 5 secondes.

8 Et si je ne suis pas sûre de mon résultat ?

- Si une ligne bleue apparaît dans la Fenêtre Témoins et le signe '+' dans la Fenêtre de Résultat au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, votre résultat est 'Enceinte'.

L'aspect du signe « + » dans la Fenêtre de Résultat peut varier selon les cas mais les lignes qui composent le symbole « + » et celle dans la Fenêtre Témoins doivent présenter une largeur identique (voir images A, B et C au verso).

Image A

Ce type de résultat apparaît dans le cas où vous avez fait le test après plusieurs jours de retard de règles, lorsque la concentration d'hCG est plus élevée.

Image B

Ce type de résultat n'est pas inhabituel si vous êtes enceinte et que vous faites le test à une date très proche ou le jour même du retard des règles, lorsque la concentration d'hCG est encore relativement faible.

Image C

Dans ce cas aussi, le résultat vous indique que vous êtes enceinte.

- Si une ligne bleue apparaît dans la Fenêtre Témoins et le signe '-' dans la Fenêtre de Résultat au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, votre résultat est « Pas Enceinte ».
- Si vous n'êtes pas sûre du résultat ou si le test vous indique 'Pas Enceinte' mais vous pensez malgré tout être enceinte, il vous est conseillé d'attendre au moins 3 jours avant de refaire un test en suivant attentivement les instructions au recto. **Reportez-vous à la question 11.**

9 Pendant combien de temps le résultat reste-t-il lisible?

Le résultat reste lisible pendant 10 minutes après son apparition. Passé ce délai, toute modification dans la Fenêtre de Résultat ne doit pas être prise en compte.

10 Mon test indique que je suis enceinte, que dois-je faire?

Si votre test indique que vous êtes enceinte, consultez votre médecin qui vous expliquera en détail toutes les étapes et démarches à suivre.

11 Mon test indique que je ne suis pas enceinte mais j'ai un retard de règles, que dois-je faire ?

Si vous avez un retard de règles et si le résultat de votre test est 'Pas Enceinte', refaites un test dans 3 jours si vous soupçonnez malgré tout une grossesse. Si à nouveau vous obtenez le résultat 'Pas Enceinte' et si vous n'avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.

Service Consommateurs Clearblue - Nos conseillères sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 à 16 heures, jours fériés exceptés.

0811 / 90 04 19

Coût d'un appel local; consultez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif en vigueur.

Veuillez nous indiquer le numéro de **LOT** qui figure sur votre boîte.

Veuillez noter que les appels seront enregistrés pour des raisons de formation et contrôle qualité.

Des renseignements sur les étapes à suivre après avoir fait le test ainsi que des informations générales sur la grossesse sont disponibles sur notre site internet :

www.Clearblue.info

Conserver à température ambiante. Garder hors de portée des enfants.

Auto-diagnostic. Usage in vitro uniquement. [IVD]

Usage unique. Jeter avec les déchets ménagers habituels après utilisation.

Ne pas utiliser si la pochette de protection est endommagée.

Ne pas utiliser un test dont la date de péremption est dépassée.